

Benodigheden

1. Tracoe Cleaning Powder
2. Tracoe Cleaning Tub
3. Provox Swabs
4. Gaaskompressen

Binnencanules moeten dagelijks worden gereinigd en indien nodig vaker om slijm te verwijderen, ophoping van slijm te voorkomen en om de canule schoon te houden.



Zet alle benodigheden klaar.



Los 1 doseerlepel (ongeveer 5 gram) Tracoe reinigingspoeder op in 500ml lauwwarm kraanwater in de Tracoe Cleaning Tub.



Plaats de binnencanule in het gaasmandje en dompel deze onder in de reinigungsoplossing.



Laat de binnencanule 10 tot 15 minuten weken en verwijder het gaasmandje.



Verwijder eventueel achtergebleven slijmresten van de binnencanule met een swab zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

Gooi de swab na gebruik weg.



Spoel de binnencanule af in een kom met schoon water of onder lauw kraanwater.

De overgebleven reinigungsoplossing kan tot 24 uur worden hergebruikt.



Laat aan de lucht drogen en berg de binnencanule op in een schoon, droog en afsluitbaar bakje voor volgend gebruik.



Bekijk hier de instructievideo

LET OP: De binnencanule mag uitsluitend worden gereinigd ná verwijdering uit de buitencanule en nooit wanneer de canule zich nog in uw tracheostoma bevindt.

Producent:

Tracoe Medical GmbH
Reichelsheimer Straße 1/3
55268 Nieder-Olm, Germany

Atos Medical Benelux
Werner von Siemensstraat 11
1712 PN Zoetermeer
Nederland

Atos Medical BV
Tel. +31 (0)79 593 50 00
info.nl@atosmedical.com
www.atosmedical.nl

Atos Medical BVBA
Tel. +32 (0)2 218 55 50
info.be@atosmedical.com
www.atosmedical.be

©Coloplast A/S. Alle rechten voorbehouden. Atos en het Atos Medical logo zijn handelsmerken van Coloplast A/S.

Disclaimer: De in dit document verstrekte informatie is geen vervanging van de officiële gebruikershandleidingen van de getoonde producten. Raadpleeg altijd uw arts, clinicus of bevoegd zorgverlener voor advies met betrekking tot uw persoonlijke situatie en het gebruik van deze producten.

MC3022 BNL 2023